



<b>Numéro d'article</b>	120805
<b>Prix HT</b>	35,14 €
<b>Prix TTC</b>	42,52 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

---

Bandelettes Fluoriscine Fluo 900 - Stérile - 100 pièces  
Bandelettes Fluoriscine pour l'évaluation de :

- intégrité cornéenne
- ajustement dimensionnel stable
- tonométrie d'application
- BUT test pour les yeux secs

## Mode d'emploi Bandelettes Fluoriscine Fluo 900:

Humidifier la bandelette avec de l'eau stérile ou une solution ophtalmique stérile. Le liquide lacrymal du fornix inférieur peut être utilisé. Pendant que le patient regarde vers le haut, touchez la conjonctive ou le fornix avec une pointe humide. Pour des résultats optimaux, le patient doit cligner des yeux plusieurs fois après l'application.