



# Chargeur de table universel pour manche de BASIC et PLUS - Welch Allyn - NOUVEAU 2021

08/10/2025 01:59:34



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 122313              |
| <b>Prix HT</b>          | 216,00 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 261,36 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 2 en stock |

## Description

---

Chargeur de table universel pour Basic Lithium-Ion et poignée PLUS avec système de clic pour le Smart Bracket

## Chargeur de bureau universel avec système de clic pour le Smart Bracket

Le chargeur de table universel Welch Allyn est un chargeur universel compact et portable pour charger la basic lithium-ion et les poignées Plus. Le chargeur de table dispose d'un système de clic pratique pour attacher votre Smart Bracket au chargeur de

table. De cette façon, il ne se perd jamais et vous avez toujours [le Smart Bracket](#) à portée de main.

## Comment utiliser ce chargeur de bureau?

Le chargeur de table universel est immédiatement prêt à l'emploi lorsque le cordon d'alimentation (inclus) est connecté à une prise de terre. Placez la ou les poignées dans le(s) support(s). Pour charger complètement une poignée entièrement déchargée ou neuve, laissez la poignée dans le chargeur pendant la nuit. Gardez les poignées chargées pendant la journée entre les examens en les plaçant dans les supports. Remarque: lorsque la poignée de la batterie lithium-ion 71900/11 et la poignée du chargeur de table USB 719-3 Lithium-Ion Plus sont complètement chargées, le voyant orange s'éteint. Le voyant d'alimentation vert indique que le chargeur est connecté au secteur.

### **Nettoyage et entretien du chargeur de bureau universel**

Débranchez le chargeur de la prise murale avant de nettoyer le chargeur. Une fois par mois, essuyez l'extérieur pendant 10 secondes avec un chiffon de nettoyage légèrement humide. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les contacts des socles de charge et le bas de la poignée de la batterie rechargeable. Le chargeur de table universel ne convient pas à la stérilisation.

## Afbeeldingen

---

