



Numéro d'article	122335
Prix HT	86,82 €
Prix TTC	105,05 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

iExaminer Smart Bracket pour Macroview/PanOptic PLUS - Welch Allyn

Qu'est-ce que le «iExaminer Smart Bracket»?

Avec le support intelligent iExaminer cliquable, vous pouvez convertir l'otoscope Macroview Plus en un otoscope numérique. Vous pouvez télécharger l'application gratuite iExaminer et prendre des images vidéo ou des photos de l'oreille. Vous pouvez revoir ces images, les transmettre et en discuter avec vos collègues. L'application iExaminer peut être utilisée avec les smartphones Android et Apple.

Comment installer l'application iExaminer?

Installer l'application iExaminer smart: téléchargez l'application iExaminer sur l'App Store® ou Google Play®. Ouvrez l'application iExaminer. Lisez et acceptez les Conditions générales. Définissez un mot de passe.

Comment installer le Smart Bracket iExaminer?

Montage du support iExaminer smart. Pour les téléphones équipés de plusieurs objectifs d'appareil photo, déterminez l'objectif principal: Ouvrez l'application iExaminer et entrez votre mot de passe. Sur l'écran examens enregistrés, appuyez sur (iOS) ou (Android). Sur l'écran d'examen, appuyez sur Add image (= Ajouter une image). En regardant votre doigt sur l'écran, déplacez-le vers l'objectif jusqu'à ce qu'il le touche presque. L'objectif que votre doigt survole est l'objectif principal. Insérez votre téléphone dans un étui lisse, plat et rigide. Suivez les étapes illustrées (Voir manuel) pour aligner le SmartBracket sur l'objectif principal . Assurez-vous que le support est fixé solidement à l'étui. Suivez les étapes illustrées dans le guide ci-dessous pour aligner l'iExaminer Smart Bracket avec l'objectif principal. Assurez-vous que le support est solidement fixé au couvercle. Fixez le SmartBracket à l'otoscope ou à l'ophtalmoscope. Contenu de l'emballage: 1x Smartbracket, 2x Smartclips et manuel d'instructions.

Afbeeldingen

