



Aniosyme X3 - avec doseur 25ml - 1 litre - nettoyage et pré-désinfection des instruments

08/10/2025 12:45:52



Numéro d'article	016220
Prix HT	24,93 €
Prix TTC	30,17 €
Stock	en stock

Description

Aniosyme X3 - avec doseur 25ml - 1 litre - nettoyage et pré-désinfection des instruments
Pour en savoir plus sur le nettoyage et la désinfection des instruments, consultez notre blog. [Cliquez ici](#) Ce désinfectant est entièrement conforme aux directives (classe CE IIb conformément à la directive européenne 93/42 / CEE). Suivez les étapes suivantes:

--	--

Etape 1 Dilution à 0,5%. Versez 25 ml d'Anyosyme X3 dans de l'eau froide ou tiède.

Etape 2 Immergez complètement le dispositif ou les instruments médicaux. Nettoyez avec une brosse. Temps d'immersion recommandé: 5 minutes.

Nettoyez les instruments et rincez soigneusement à l'eau du robinet. Pour les
Etape 3 instruments semi-critiques ou critiques, passez à l'étape suivante: la désinfection.

Pour les instruments non critiques, c'est la dernière étape: sécher avec un
Etape 4 chiffon propre et stocker le matériel.