



Steranios 2% - Nettoyage des instruments et désinfection (produit prêt à l'emploi) - 5 litres

08/10/2025 08:58:10



Numéro d'article	016214
Prix HT	22,32 €
Prix TTC	27,01 €
Stock	sur commande

Description

Steranios 2% est un désinfectant de haute qualité utilisé pour la désinfection des dispositifs médicaux, des équipements chirurgicaux et médicaux, des équipements d'endoscopie médicale et des matériaux thermosensibles. Steranios 2% permet une désinfection complète à froid par immersion de matériel ou d'instruments médicaux.

Steranios 2% est une solution claire et écologique sans activateur et donc prête à l'emploi.

Cette solution est active en une heure contre les bactéries, levures, champignons, virus et mycobactéries en 20 minutes. L'efficacité du bain peut être vérifiée toutes les 4 heures avec une bandelette spécifique. Le bain peut être conservé jusqu'à 7 jours (conformément à la note DGS 591 du 17/12/2003). Steranios 2% a une grande

compatibilité avec tous les types de matériaux. Il peut être combiné avec n'importe quel type de détergent pré-désinfectant.

Spécifications du désinfectant Steranios 2%.

- Facile à utiliser
- pH neutre
- Permet une désinfection complète et à froid des instruments sensibles à la chaleur
- Sans dilution
- Produits référencés dans la liste positive S.F.H.H.H.
- Solution transparente et écologique
- Actif contre *Helicobacter pylori*
- Solution tampon de glutaraldéhyde (2 %, pH 6, citrate de sodium)
- Steranios 2% ECS contient des ingrédients qui limitent et contrôlent l'évaporation du glutaraldéhyde.
- Tueuse de spores complète (réduction de 5 logs)
- Haute compatibilité avec tout type de matériau
- Durée de conservation : 3 ans à partir de la date de fabrication
- Utilisé en combinaison avec un produit de nettoyage pré-désinfectant.

Mode d'emploi du désinfectant Steranios 2%.

Avant d'utiliser l'assainisseur Steranios 2%, l'instrument médical doit être nettoyé avec un type de produit : Aniosyme DD1, Hexanios G+R, ou Aniosyme PLA II. Rincez soigneusement l'appareil. Rincer soigneusement l'équipement endoscopique et l'essuyer avec un chiffon. Pour désinfecter le dispositif médical, verser le désinfectant Steranios 2% dans un récipient et couvrir le récipient. Selon l'activité désirée, laisser poser 10 minutes ou 1 heure puis rincer abondamment à l'eau stérile ou filtrée (0.2µm). Rincer soigneusement les instruments endoscopiques à l'intérieur et à l'extérieur. Enfin, séchez le dispositif médical avec un chiffon à usage unique. Conservez l'appareil dans un endroit aussi aseptisé que possible jusqu'à la prochaine utilisation. ATTENTION! Le désinfectant Steranios 2% est considéré comme une solution dangereuse! Respectez les mesures de précaution!

Composition

Steranios 2% ECS contient 2 ingrédients qui ensemble limitent l'évaporation du glutaraldéhyde.