



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 0711093             |
| <b>Prix HT</b>          | 59,85 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 72,42 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

L'attelle de genou Thuasne Genu Dynastab, gris est une attelle avec des côtes robustes et articulée pour soutenir la rotule.

## Caractéristiques Genu Dynastab

1. Charnière à deux axes
2. Charnière à placer sur le genou latéral
3. Zones tricotées au-dessus de l'attelle, sur le genou, creux du genou
4. Réglable avec du Velcro
5. Silicone antidérapant intégré contre l'affaissement.
6. Une mise en place et un retrait faciles


## Indications attelle de genou Genu Dynastab

- Traitement fonctionnel des entorses et de leurs conséquences.
- Soutien après un traitement chirurgical et pendant la réadaptation.

- Reprise des activités après une entorse (sports, professions lourdes).

*Recommandations pour l'insertion de l'article* Vérifiez que la rotule est exactement centrée dans le guide de la rotule. Précautions : Suivez les recommandations du fournisseur qui a prescrit ou fourni l'article. En cas de malaise, consultez ce fournisseur. Conserver à température ambiante, de préférence dans la boîte d'origine. En raison d'éventuels problèmes d'hygiène et de fonctionnement, nous vous conseillons vivement de ne pas réutiliser ce produit pour le traitement d'un autre patient. Dans ce cas, la réutilisation est entièrement à la charge de celui qui a pris cette décision, et la garantie de Thuasne expirera automatiquement. *Maintenance* - Il est préférable d'enlever les côtés avant le lavage. A cette fin : - Desserrez les sangles (sur le côté pour l'ajustement). - Maintenez le bandage du genou en position verticale et retirez l'articulation par l'ouverture supérieure. Remplacez-le : - Maintenez le bandage du genou en position verticale. - Insérez l'articulation, avec la partie incurvée vers l'extérieur et la partie incurvée vers l'arrière. - Assurez-vous que les extrémités dépassent correctement des ouvertures. - Ré-appliquez les ligaments. - Laver à la main uniquement à 40°C avec un détergent doux sans agent de blanchiment ni assouplissant. - Éliminez l'eau en appuyant, ne la tordez pas. - Séchez hors de portée d'une source de chaleur.

## Disponible en différentes tailles

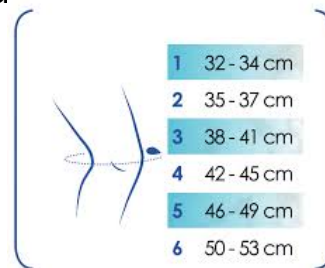

Taille - Universelle pour la gauche/droite