



Numéro d'article	071063
Prix HT	64,34 €
Prix TTC	77,85 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

La genouillère Genu Pro Comfort est équipée d'un insert de rotule en silicone. La proprioception est assurée par un tissu de compression élastique. Le Genu Pro Comfort est très confortable avec un tissu super extensible à l'arrière. La genouillère est finie à l'intérieur par un matériau en silicone antidérapant sur les côtés. Cela permet de maintenir l'attelle du genou en place.

Indications Genu Pro Comfort:

- Douleur au genou ou à la rotule
- Légère instabilité rotulienne
- Tendinopathie de la rotule (genou du sauteur)
- Douleur et/ou gonflement du genou
- Arthrose légère à modérée du genou

Fonctionnement Genu Pro Comfort:

- Coussin d'air flexible adaptatif pour soutenir la rotule (genou)
- Tricot de compression élastique standardisé (23-32 mmHg) qui apporte soutien et proprioception
- Construction en tricot spécifique pour faciliter l'ajustement
- Le panneau arrière de la genouillère et les oreillettes sont fabriqués dans des matériaux spécifiques pour faciliter l'enfilage.
- Fil de viscose appliqué pour plus de douceur
- Genouillère maintenue en place sur la jambe grâce à des ailettes sphériques flexibles et un système antidérapant

Caractéristiques du produit :

Le dispositif est destiné exclusivement au traitement des indications énumérées et aux patients dont la taille correspond au tableau des tailles. Le produit peut être porté dans les deux sens et est disponible en 7 tailles. La genouillère se compose de :

- Un insert rotulien amovible
- Un matériau tissé anatomique avec une maille douce et confortable à l'arrière de la genouillère
- Deux rotules latérales flexibles

Mode d'emploi :

Il est recommandé de porter l'orthèse directement sur la peau, sauf en cas de contre-indications. - Faites asseoir le patient sur le bord d'une chaise et demandez-lui de fléchir le genou avec une flexion de 30 à 60°. Pour faciliter la mise en place, utilisez les tirettes situées en haut de la genouillère . - Tirez la genouillère sur la jambe pendant que le pied est en extension. - Assurez-vous que la rotule est correctement positionnée au centre de l'insert . - S'assurer que la genouillère est parfaitement tendue sur la jambe.

Bon à savoir :

Il est recommandé de porter l'orthèse directement sur la peau, sauf en cas de contre-indications. - Faites asseoir le patient sur le bord d'une chaise et demandez-lui de plier le genou de 30 à 60°. Utilisez les tirettes situées en haut de la genouillère pour faciliter la mise en place. - Tirez la genouillère sur la jambe pendant que le pied est en extension. - S'assurer que la rotule est correctement positionnée au centre du coussinet . - S'assurer que la genouillère est parfaitement tendue sur la jambe.