



Numéro d'article	150230
Prix HT	46,27 €
Prix TTC	55,99 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Un disque tournant réduit la pression sur le dos du soignant lorsqu'il déplace un patient. Un disque tournante facilite le mouvement pour sortir du fauteuil roulant ou du lit. Comme le disque tournante tourne avec le patient, le passage du lit au fauteuil roulant, par exemple, devient plus facile. Le plateau tournant convient aux personnes qui ont encore une fonction de personnel et une stabilité suffisante, mais qui sont autrement difficiles à faire marcher.

Mode d'emploi du disque

- Placez le plateau tournant sur le sol sous les pieds de la personne soignée assise.
- Empêchez le cadran de tourner par inadvertance en plaçant le pied sur le cadran avec le talon sur le sol.
- Amenez le patient à la barre.

- Un mouvement de poussée du pied va maintenant faire tourner le cadran.
- Bloquez à nouveau la platine avec le pied avant de laisser le patient assis.

Afbeeldingen

