


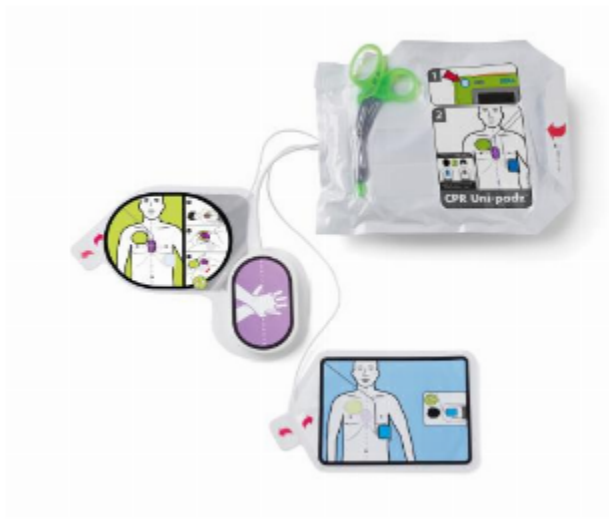

Numéro d'article	31111
Prix HT	250,16 €
Prix TTC	302,69 €
Stock	en stock

Description

CPR Uni-padz avec retour d'information sur la RCP pour AED 3 (kit d'accessoires inclus)

Les CPR Uni-padz avec retour d'information sur la RCP pour AED 3 sont des électrodes universelles exclusivement à être utilisées avec le défibrillateur ZOLL AED 3.

Informations sur le produit

- Électrodes véritablement universelles, utilisables pour les adultes et les enfants: Le bouton enfant permet de passer facilement et rapidement de la RCP adulte à la RCP enfant. Aucune autre électrode ne doit être connectée. Aucune clé n'est nécessaire.
 - Enfants: 8 ans ou moins, ou pesant moins de 25 kg

- Destinées exclusivement à être utilisées avec le défibrillateur ZOLL AED 3
- Les CPR Uni-Padz sont préconnectées au ZOLL AED pour une utilisation rapide
- Durée de vie de cinq ans à compter de l'installation
- Retour d'information complet sur la RCP (Real CPR Help)

Une aide réelle pour la RCP

Lors d'une RCP, il n'est pas rare que les compressions ne soient pas effectuées correctement en termes de rythme et de profondeur. Les victimes adultes ont besoin d'au moins 100 compressions par minute et d'une profondeur d'au moins 5 cm. Les compressions doivent être effectuées correctement pour que le sang et l'oxygène soient délivrés efficacement. Le ZOLL AED Plus convertit instantanément les données de compression du CPR Uni-padz et fournit un métronome adaptatif qui aide le secouriste à maintenir le rythme et la profondeur corrects, avec des messages tels que "Appuyez plus fort" ou "Bonnes compressions". La profondeur de compression de la RCP est également indiquée sur l'écran d'affichage. L'AED Plus de ZOLL est le seul DEA qui aide le secouriste à maintenir le rythme et la profondeur des compressions thoraciques pendant la RCP.

Aucun autre DEA ne possède cette fonction.

Kit d'accessoires correspondant

Chaque ensemble de CPR Uni-padz est accompagné d'un kit d'accessoires de RCP correspondant. Celui-ci comprend

- des ciseaux pour ouvrir les vêtements de la victime et dégager la poitrine
- des gants (non en latex) et un masque respiratoire pour protéger le secouriste
- une serviette en papier pour s'assurer que les points de contact avec les électrodes sont secs
- une lame de rasoir pour enlever les cheveux
- et un chiffon pour le nettoyage ultérieur.