



Numéro d'article	023337
Prix HT	17,80 €
Prix TTC	21,54 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Decifera la mousse de silicone est un pansement en mousse non adhérent et hautement absorbant avec une couche de contact avec la plaie en silicone.

Decifera NOUVELLE gamme de soins des plaies

Decifera propose une gamme complète de produits de soin des plaies de haute qualité pour les plaies complexes. Une gamme claire dans laquelle il est facile de faire le bon choix. Cela simplifie les soins complexes des plaies. Il fournit des soins fiables, qui sont également très abordables. Par conséquent: Decifera, le choix le plus intelligent pour les plaies complexes.

Comment fonctionne le pansement en mousse de silicone Decifera?

Decifera Foam Silicone est un pansement en mousse non adhérent et hautement absorbant avec une couche de contact avec la plaie en silicone et un film PU sur le dos. Decifera Foam Silicone contribue à un environnement humide de la plaie et favorise ainsi

un processus de cicatrisation optimal. Il absorbe l'excès d'exsudat de la plaie au cœur de la couche de mousse de polyuréthane hautement absorbante. Une partie de l'exsudat de la plaie s'évapore à travers la couche de film de polyuréthane sur le dos. Cela augmente la capacité d'absorption du pansement, minimisant les changements de pansement.

Le moins de changements de pansement possible

Le moins de changements de pansement possible. Ceci n'est possible qu'avec une bonne gestion des exsudats, dans laquelle une capacité d'absorption élevée peut jouer un rôle. Avec le pansement mousse Decifera en silicone, vous disposez d'un produit qui contribue au processus de cicatrisation et où le nombre de changements de pansement est minime. Agréable pour vous et votre patient.

Comment utiliser le pansement en mousse de silicone Decifera?

Nettoyez toujours la plaie avant d'appliquer un pansement. Vous pouvez personnaliser le pansement en mousse en le coupant pour s'adapter à une plaie spécifique. Le pansement doit couvrir la peau sèche environnante sur un minimum de 1 à 2 cm et de 3 à 5 cm pour les plus grandes tailles. Vous pouvez fixer le pansement en utilisant [un pansement de fixation](#) (de préférence avec du silicone) ou [un pansement auto-adhésif](#). Discutez avec votre médecin ou votre infirmière de la fréquence à laquelle vous devez changer les pansements.