



Artikelnummer	010319
Prijs excl. BTW	€ 12,08
Prijs incl. BTW	€ 14,62
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Naaldloze afsluitdopjes (connectoren) Naaldloze afsluitdopjes met een veersysteem, connectoren genoemd, worden gebruikt op de aan- en afsluitpunten van (driewegkraantjes op) centraal veneuze katheters (CVK), veneuze poortsystemen en perifere of subcutane canules. Ze worden niet verwijderd om de katheter, poort of canule te kunnen gebruiken voor het toedienen van infuusvloeistof of medicatie. Er bestaan connectoren die een negatieve-, een positieve- of een non-displacement hebben. Connectoren met een positieve- of een non-displacement kunnen terugstromen van bloed in de canule/CVK en daarmee verstopping voorkomen. Werking: Het latex membraan van het afsluitdopje wordt door een metalen veertje op zijn plaats gehouden en sluit zo het dopje af (zie plaatje). Door het aankoppelen van de spuit (met luer- of luer-lockaansluiting) wordt het membraan naar binnen geduwd en over het roestvrijstalen naaldje geschoven dat zich binnenin het afsluitdopje bevindt. Wanneer de spuit wordt losgekoppeld sluit het membraan zich vanzelf weer. Gebruik: Gebruik de connector in plaats van een 'gewoon' afsluitdopje. Connectoren zijn geschikt voor alle intraveneuze infuustoedieningen, ook parenterale voeding, cytostatica en bloedproducten. Er kan bloed worden afgenomen met een 'gewone' injectiespuit of met een vacuümsysteem met lueradaptor. Gebruik

materialen met een luer- of een male luer-lockaansluiting om op het afsluitdopje aan te sluiten. Voor het aankoppelen van een spuit moet men enige kracht zetten om de conus goed te laten aansluiten op het afsluitdopje. Een compacte, transparante naaldloze connector met neutrale verplaatsing.

De NeutraClear® connector biedt de voordelen van een design met interne stompe canule, met verbeterde integriteit van de afsluiting.

Geleidende afsluitingsring Helpt de integriteit van het silicone in stand houden. Zorgt voor een betere afsluiting van het split septum na herhaalde activaties. Gemakkelijk te desinfecteren Een glad, gemakkelijk te reinigen oppervlak helpt het risico op binnendringen van bacteriën beperken. Split septum Bij gebruik van naaldloze systemen kan een split septum een betere keuze zijn. Doeltreffend flushen Door de doorschijnende vloeistofdoorgang kunnen de gezondheidswerkers zien of ze doeltreffend te werk gaan en een inefficiënte flushtechniek meteen corrigeren. Geoptimaliseerde vloeistofdoorgang De rechte vloeistofdoorgang van de canule zorgt voor laminaire stroming en vlot flushen. Compact, licht design Geschikt voor gebruik in de neonatologie en de pediatrie. Gemakkelijk te hanteren door gezondheidswerkers Interne stompe canule Ontworpen voor minimaal contact tussen de buitenkant van de connector en de vloeistofdoorgang bij lueractivatie. Naaldvrije connector met neutrale verplaatsing