



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 010324      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 16,40     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 19,84     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

Een desinfecterende dop is een afsluitdop voor een vrouwelijke IV-poort met 70% isopropylalcohol als desinfecterend middel.

## Deze desinfecterende dop zorgt voor een snelle en krachtige desinfectie

De dop desinfecteert met een gesteriliseerde oplossing van 70% isopropylalcohol. Dit zorgt voor 99,99% vermindering van de bacteriën binnen 1 minuut. De desinfecterende dop houdt tot zeven dagen lang een fysieke barrière tegen besmetting in stand en bevestigt dat het desinfectieprotocol is nageleefd. Dit verkleint dus de kans dat ziekteverwekkers de IV-poort binnenkomen via de katheter na de plaatsing.

**De dop is eenvoudig in gebruik**

De dop blijkt compatibel te zijn met naaldloze luer-connectoren. De dop is eenvoudig al draaiend te bevestigen en blijft goed vastzitten op gangbare [naaldloze connectoren](#). De dop heeft een grote breedte en vingergrepen voor het gemakkelijk aanbrengen en verwijderen. Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

## Gebruiksaanwijzing

Haal de folie van de desinfecterende dop of verwijder de dop van de IV-paalstrip. Breng het dopje aan op de naaldvrije luer connector door te duwen en te draaien. De dop moet op de naaldvrije luer-connector blijven zitten gedurende minstens 60 seconden en mag er maximaal 7 dagen op blijven zitten.

## Voordelen van de desinfecterende dop

- Vereenvoudigde en gestandaardiseerde desinfectietechniek = bespaart verpleegtijd
- Gemakkelijkere naleving van richtlijnen voor desinfectie
- Passieve, continue desinfectie van klep en schroefdraad
- Bescherming van de klep tegen aanraking en luchtvervuiling
- Naleving van ventieldesinfectie is visueel en meetbaar

## Afbeeldingen

---

