



Artikelnummer	170293
Prijs excl. BTW	€ 39,14
Prijs incl. BTW	€ 47,36
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De OneTouch[®] Verio[®] teststrips moeten worden gebruikt met de OneTouch[®] Verio[®] bloedsuikermeter voor kwantitatieve glucosemetingen in vers capillair volbloed. OneTouch[®] Verio[®] teststrips zijn bedoeld voor gebruik met de OneTouch[®] Verio[®], OneTouch[®] Verio[®]IQ en OneTouch[®] Verio[®] Pro bloedglucosemeters om de hoeveelheid glucose in vers capillair volbloed te meten.

Kenmerken van OneTouch[®] Verio[®]

- Teststrip zuigt bloed automatisch op
- Strips mogen aangeraakt worden
- Bloed kan eenvoudig (links en rechts) op de OneTouch[®] Verio[®] teststrip aangebracht worden

Bewaring en gebruik

- Bewaar het buisje met de teststrips op een koele, droge plaats onder 30 °C. Bewaar het niet in de koelkast. Bescherm het buisje tegen direct zonlicht en hitte.
- Bewaar uw teststrips uitsluitend in het originele buisje om het risico op besmetting en beschadiging te vermijden.
- Open het buisje met de teststrips pas wanneer u klaar bent om te testen. Open het buisje alleen om er teststrips uit te nemen.
- Plaats de dop onmiddellijk weer op het buisje en sluit het goed af nadat u er een teststrip hebt uitgehaald. Gebruik elke teststrip onmiddellijk nadat u hem uit het buisje hebt gehaald.
- Gebruik geen teststrips uit een buisje dat beschadigd is of dat heeft opengestaan.
- Noteer de uiterste gebruiksdatum (6 maanden na opening van het buisje) op het etiket telkens wanneer u een buisje voor het eerst openmaakt.
- Gebruik geen teststrips na de vervaldatum (vermeld op het etiket van het buisje) of de uiterste gebruiksdatum, naargelang welke datum eerst valt.
- Voorkom dat er vuil, eten of vloeistoffen op de teststrip terechtkomen. Met schone en droge handen mag u de teststrip overal aanraken.
- U mag de teststrip op geen enkele manier buigen, met een scherp voorwerp bewerken of veranderen.
- De teststrips zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Gebruik nooit opnieuw een teststrip waar bloed of controlevloeistof op aangebracht is.
- Zorg ervoor dat uw meter en teststrips ongeveer op dezelfde temperatuur zijn vóór u test.
- Breng alleen OneTouch[®] Verio[®]-controlevloeistof of een bloedstaal aan op de teststrip.
- Stop de gebruikte teststrip na de test niet terug in het buisje.