

# Veroval duo Control - digitale bovenarm bloeddrukmeter - Medium

08/10/2025 07:13:40



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 313966                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 73,94                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 89,47                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 5 op voorraad |

## Omschrijving

Veroval Duo Control Bloeddrukmeter met Duo Sensor Technologie Veroval® Duo Control geeft bloeddrukmeting met de nauwkeurigheid van de manuele meting bij de huisarts en met de eenvoud van een digitaal toestel. Signaleert ritmestoornissen. De Veroval Duo Control bloeddrukmeter is een volautomatische bloeddrukmeter voor zelfmeting, die twee professioneel gebruikte meetmethoden combineert: de oscillometrische techniek en de Korotkoff-methode. Een geheugen voor twee keer 100 meetwaarden maakt persoonlijk gebruik door twee patiënten mogelijk. Per gebruiker berekent deze bloeddrukmeter het gemiddelde van alle opgeslagen meetwaarden en het gemiddelde van de ochtend- en avondbloeddruk van de laatste 7 dagen. Dit product heeft vijf jaar garantie. Manchetomtrek van de Veroval® Duo Control Bloeddrukmeter:

- Medium = 22 - 32 cm.
- Large = 32 - 42 cm

# Voordelen van de Veroval<sup>®</sup> Duo Control Bloeddrukmeter:

- De Veroval<sup>®</sup> Duo Control Bloeddrukmeter heeft een betrouwbare meting van de bloeddruk en de hartslag.
- De Veroval<sup>®</sup> Duo Control Bloeddrukmeter detecteert en toont een hartritmestoornis op het scherm.
- De Veroval<sup>®</sup> Duo Control Bloeddrukmeter is eenvoudig gebruik. Met één druk op de knop meet u uw bloeddruk en hartslag.
- De Veroval<sup>®</sup> Duo Control Bloeddrukmeter heeft dezelfde nauwkeurigheid als bij uw arts.

## Toepassing Veroval<sup>®</sup> Duo Control Bloeddrukmeter:

De Veroval<sup>®</sup> Duo Control bloeddrukmeter is bijzonder geschikt voor mensen met hoge bloeddruk en verschillende vormen van hartritmestoornissen.

## Gebruiksaanwijzing:

1. Rust ongeveer 5 minuten.
2. Plaats het toestel op een tafel, ga gemakkelijk zitten, ontbloot uw arm.
3. Leg uw arm op de tafel. Uw arm bevindt zich thv het hart (meer bepaald thv uw borst).
4. Plaats de manchet op de juiste hoogte (2,5 cm boven armplooi) in de aangeduide richting (kabel richting hand) op de bovenarm.
5. Start meting - niet bewegen, niet praten, ontspannen blijven (geen vuist maken).
6. Herhaal de meting 2 tot 3 maal na elkaar met 1 minuut tussentijd. Meet altijd op hetzelfde tijdstip uw bloeddruk.

De bovenarmmanchet van de Veroval Duo Control bloeddrukmeter is voorzien van duidelijke pictogrammen, waaronder een logo met rode pijl voor het perfect aanbrengen van de manchet. Krachtig geheugen: 2 x 100 waarden en gastenmodus. Registratie van ochtend- en avondwaarden. Berekening gemiddelde over 7 dagen, volgens de ESH richtlijnen.

## Medisch veilig en klinisch gevalideerd

- Klinische validaties: EHS, BHS, AAMI Richtlijnen, EN 1060-4, ISO 81060-2, DHL certificatie (Duitse Hypertensie Liga)
- Aanbevolen bij hoge bloeddruk en hartritmestoornissen