

WELCH ALLYN iExaminer Smart Bracket voor Macroview/PanOptic Plus

08/10/2025 03:58:53



Artikelnummer	122335
Prijs excl. BTW	€ 86,82
Prijs incl. BTW	€ 105,05
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

iExaminer Smart Bracket voor Macroview/PanOptic PLUS - Welch Allyn
Wat is de "iExaminer Smart Bracket" ?

Via de opklikbare iExaminer Smart Bracket kan u de [Macroview Plus otoscoop](#) omvormen tot digitale otoscoop. U kan de gratis app iExaminer downloaden en zo kan u video beelden of foto's maken van het oor. Deze beelden kan u opnieuw bekijken, doorsturen en bespreken met collega's. De iExaminer app is zowel te gebruiken met Android als Apple smartphones.

Hoe de iExaminer App installeren?

App iExaminer installeren: Download de iExaminer App in de App Store of Google Play. Open de iExaminer App. Lees de algemene voorwaarden en ga akkoord. Stel een wachtwoord in.

Hoe de iExaminer Smart Bracket installeren?

De iExaminer Smart Bracket monteren. Voor telefoons met meer dan één cameralens moet de primaire lens worden ingesteld: Open de iExaminer App en voer uw wachtwoord in. Tik in het scherm Saved Exams (Opgeslagen onderzoeken) op(iOS) of (Android). Tik in het scherm Exam (Onderzoek) op Add Image (Beeld toevoegen). Veeg met uw vinger over het scherm naar de lens totdat u de lens bijna raakt. De lens waarboven uw vinger zich bevindt, is de primaire lens. Plaats uw telefoon in een gladde, vlakke, stevige hoes. Volg de geïllustreerde stappen in onderstaande handleiding om de iExaminer SmartBracket uit te lijnen met de primaire lens. Zorg ervoor dat de steun stevig aan de hoes is bevestigd. Bevestig de SmartBracket aan de otoscoop of de oftalmoscoop. Inhoud van de verpakking: 1x Smartbracket, 2x smartclips en handleiding

Afbeeldingen

