

HEKURA Urinezak voor meerdaags gebruik - 2000ml - 10 stuks

08/10/2025 13:12:05



Artikelnummer	182025
Prijs excl. BTW	€ 12,35
Prijs incl. BTW	€ 14,94
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

HEKURA Urinezak voor meerdaags gebruik - 2000ml - 10 stuks Te gebruiken bij een verblijfscatheter, eenmalige catheter, externe condoom catheter of doorgekoppeld in combinatie met een beenzak. Nachtzak/bedzak met kruiskraan voor meerdaags gebruik.

- Maximaal 7 dagen te gebruiken
- 2000 ml, maatverdeling indicatief weergegeven
- Extra dikke slang diameter van 9,5 mm
- Terugslagventiel
- Voorzien van een vaste connector

- Slang in te korten naar gewenste lengte, losse connector hiervoor is bij te bestellen (UZ 5555)
- PVC en PE

Gebruiksaanwijzing urinezak

1. Was de handen zorgvuldig.
2. Optioneel: knip de slang op gewenste lengte en bevestig de connector stevig op de slang van de urinezak.
3. Verwijder de groene beschermhuls van de connector en zorg ervoor dat de kraan gesloten is.
4. Koppel de urinezak aan de katheter of de beenzak d.m.v. een koppelstuk. Bij meerdaags gebruik in combinatie met een dagzak de urinezak na ieder gebruik afkoppelen, spoelen (eventueel met een scheutje azijn) en laten drogen alvorens opnieuw te gebruiken.
5. Bevestig de urinezak met fixatiemateriaal op de gewenste plek aan het been of met een bedhaak aan het bed.
6. Open de kraan om de zak te legen. Reinig na leging het uiteinde van de kraan.
7. Schuif de kruiskraan naar de andere kant om de zak te legen. Schuif de kruiskraan terug totdat er klik hoorbaar is om de zak te sluiten.
8. Klap de hefboomkraan omlaag om de urinezak te legen. Klap de hefboomkraan omhoog om de zak te sluiten.
9. Zorg altijd voor een knikvrije slang.

Afbeeldingen

