



Artikelnummer	116040
Prijs excl. BTW	€ 5.493,63
Prijs incl. BTW	€ 6.647,29
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De Hydriade Fast 4-in-1 is het eerste pre-sterilisatiesysteem. De Hydriade fast combineert zo automatisch de 4 stappen van sterilisatie namelijk desinfectie, reiniging, spoeling en het drogen van de instrumenten. De Hydriade combineert de 4 nodige stappen, maar heeft eveneens nog een pak andere voordelen tegenover andere sterilisators. Hij is gemakkelijk in gebruik, omdat U enkel het programma hoeft in te stellen en dit dan op te starten. De Hydriade is veilig en hygiënisch conform de voorgelegde richtlijnen voor dit toestel wat er voor zorgt dat er geen enkel risico is voor de gebruiker, en dus is het een zeer betrouwbaar toestel. Op langere termijn is hij kostenbesparend omdat de Hydriade duurzaam is waardoor de kost aan instrumenten daalt. Hij is ook nog eens tijdsbesparend omdat de cyclus slechts ingesteld en gestart dient te worden. Daarbovenop is het sterilisatiesysteem ruimtebesparend.

Eigenschappen Hydriade

- 3 voorgeprogrammeerde cycli (parameters kunnen aangepast worden aan uw specifieke behoeften)
- Afmetingen Hydriade: L412 x H415 x D450 mm
- Afmeting hoogte van het deksel: 750 mm
- Afmeting kuip: L332 x H120 x D127 mm
- Gewicht wanneer leeg: 20kg
- Maximum absorptie: 1,5kW
- Ultrasone: 39 KHz / 4 transducers
- Spanning: 230V - 50Hz
- De ultrasone bak is ontworpen voor gewone- en chirurgische plateau's en precisieinstrumenten

Stappenplan van de Hydriade

1. Opwarming: Het apparaat begint met de eerste opwarming en eerste ontsmetting van de instrumenten
2. Ontgassen: Dit verwijdert de opgeloste gassen in het water om verstoring met de ultrasone te vermijden en de efficiëntie van het proces te verbeteren
3. Reiniging door de ultrasone: De cavitatie staat toe om de overige resten van chemische en organische stoffen die in de ultrasonebak gevallen te zijn te elimineren. Inmiddels is ook al meer dan 95% van de bacteries verwijderd.
4. Evacuatie: De Hydriade leegt automatisch alle liquide resten in de kuip
5. Spoelen van de ultrasones: Hij gaat verder met spoelen met water onder druk. Hierdoor wordt het zelf toegevoegde water geledigd.
6. Drogen: Dit zorgt ervoor dat alles wat vochtig is verdampt.