



Artikelnummer	010410
Prijs excl. BTW	€ 9,57
Prijs incl. BTW	€ 11,58
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Skin-Prep vormt een hypo-allergene barrière op de huid voor extra bescherming tegen beschadigingen door bijvoorbeeld veelvuldige verbandwisselingen of bescherming van huid rond stoma of bij oudere patiënten.

Voordelen van Skin-prep

- Betrouwbaar
 - Skin-Prep vormt een hypo-allergene barrière tussen de huid van de patiënt en de kleeflaag van het verband of de tape. Deze laag beschermt de huid en voorkomt beschadiging tijdens het verwijderen van verband of tape.
- Veilige effectieve bescherming

- Testen hebben aangetoond dat Skin-Prep een effectieve bescherming tegen trauma biedt.
- Ook veilig bij langdurig gebruik met name bij gevoelige huid zoals rond een stoma of bij oudere patiënten.
- De unieke anti-allergische formule biedt een betrouwbare bescherming met nauwelijks irritatie of overgevoelighedsreacties.
- **Kosteneffectief**
 - De huid kan blijven ademen, dus tape en zelfklevende verbanden zullen langer en beter blijven zitten.
 - Door de verbeterde hechting aan de huid zijn er minder verbandwisselingen nodig.
- **Comfortabel**
 - Skin-Prep helpt dermatitis, het grootste verpleegprobleem in de huidverzorging, voorkomen en zorgt ervoor dat de verbandwisselingen minder pijnlijk zijn.
 - Minder frequente verbandwisselingen betekent minder beschadiging van de gevoelige huid.
- **Eenvoudig in gebruik**
 - Per stuk verpakte, handzame tissues voor het aanbrengen van de speciale lotion op die plaatsen waar de huid extra bescherming nodig heeft.
 - Eenvoudig te verwijderen met een huidreiniger of zeep en water. Hard wrijven is niet nodig en de huid hoeft niet te worden blootgesteld aan agressieve chemische reinigingsmiddelen.

Geïndiceerd als effectieve barrière tussen kleeflaag en huid.

Gebruiksaanwijzing

- Reinig en droog de huid alvorens Skin-Prep aan te brengen.
- Breng een gelijkmatig laagje aan over het gehele gebied dat u wilt beschermen. Als u een stukje heeft overgeslagen kunt u dit na het opdrogen van de eerste laag (na ongeveer 30 seconden), alsnog aanbrengen. Vermijd contact met open wonden.
- Bij het gebruik op huidplooien dient de huid van elkaar af gehouden te worden totdat de vloeistof volledig is opgedroogd. Voor maximale bescherming kan eventueel een tweede laag Skin-Prep worden opgebracht. Wanneer deze laag volledig opgedroogd is kunt u een klevend kompres opbrengen.
- Bij de verwijdering van zelfklevende verbanden kan ook de Skin-Prep verwijderd worden. Breng Skin-Prep dan ook opnieuw aan na elke verbandwisseling.
- Het is niet nodig Skin-Prep eerst te verwijderen voordat u het opnieuw aanbrengt. Reinig en droog de huid en breng Skin-Prep aan zoals hierboven beschreven.

Afbeeldingen

