

Genu Dynastab Kniebrace - Maat 5 (= omvang knie 46 - 49cm)

08/10/2025 02:12:47



Artikelnummer	0711095
Prijs excl. BTW	€ 59,85
Prijs incl. BTW	€ 72,42
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Thuasne Kniebrace Genu Dynastab, Grijs is een brace met stevige baleinen en scharnierend voor ondersteuning van de knieschijf.

Eigenschappen kniebrace Genu Dynastab

1. Twee assig scharnier
2. Scharnier te plaatsen aan zijkant knie
3. Gebreide gebieden boven brace, op de knie, knieholte
4. Afstelbare met klittenband
5. Geïntegreerde antislip silicone tegen afzakken.
6. Eenvoudig aan-uit trekken


Indicaties kniebrace Genu Dynastab

- Functionele behandeling van verstuikingen en hun gevolgen.
- Ondersteuning na chirurgische behandeling en tijdens revalidatie.
- Hervatting van activiteiten na verstuikingen (sport, zware beroepen).

Aanbevelingen bij het plaatsen van het artikel Controleer of de knieschijf precies gecentreerd is in de knieschijf geleider. Voorzorgsmaatregelen: De aanbevelingen volgen van de leverancier, die het artikel heeft voorgeschreven of geleverd. In geval van ongemak, deze leverancier raadplegen. Opbergen op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele doos. Wegens mogelijke problemen met hygiëne en functioneren, raden we u sterk af om dit product te hergebruiken voor de behandeling van een andere patiënt. Mocht dit toch gebeuren, dan valt het hergebruik volledig onder de verantwoordelijkheid van wie die beslissing genomen heeft, en dan vervalt automatisch de garantie van Thuasne.

Onderhoud - Bij voorkeur voor het wassen de zijkanten verwijderen. Hiertoe: - De banden losmaken (aan de kant voor het afstellen). - Het knieverband rechtop houden en de geleiding door de bovenste opening verwijderen. Het terugplaatsen: - Het knieverband rechtop houden. - De geleiding erin doen, met het gewelfde gedeelte naar buiten en het gebogen gedeelte naar achteren. - Nagaan dat de uiteinden op de juiste manier uit de openingen steken. - De banden opnieuw aanbrengen. - Uitsluitend met de hand wassen op 40°C met een fijnwasmiddel zonder bleekmiddel of wasverzachter. - Van water ontdoen door te persen, niet wringen. - Drogen buiten bereik van een warmtebron.

Beschikbaar in verschillende afmetingen

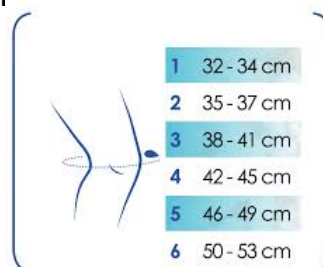

Maat - Universeel voor links/recht