



Artikelnummer	023345
Prijs excl. BTW	€ 8,20
Prijs incl. BTW	€ 9,93
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Decifera Foam met PU filmlaag is een niet verklevend, sterk absorberend schuimverband met PU filmlaag op de achterzijde.

Decifera Wondzorg gamma

Decifera biedt een overzichtelijk assortiment aan kwalitatief hoogwaardige wondzorgproducten voor complexe wonden. Een duidelijk assortiment waaruit eenvoudig de juiste keuze gemaakt kan worden. Dat brengt eenvoud in complexe wondzorg. Het levert betrouwbare zorg op, die ook nog eens heel betaalbaar is. Daarom: Decifera, de slimste keuze bij complexe wonden.

Hoe werkt Decifera schuimverband met PU filmlaag?

Decifera Foam is een niet verklevend, sterk absorberend schuimverband. De PU filmlaag op de achterzijde van het verband, zorgt voor een ademend effect. Het voorkomt het indringen van bacteriën en huidirritatie. Daardoor biedt Decifera Foam een hoog draagcomfort voor de patiënt. Doordat het verband overmatig wondexsudaat opneemt,

draagt het bij aan een vochtig wondmilieu.

Toepassingen

Dit schuimverband is te gebruiken bij matig tot sterk exsuderende wonden. Door de poreuze structuur kan het verband optimaal wondexsudaat opnemen.

Hoe gebruikt u Decifere schuimverband in silicone ?

Reinig de wonde altijd voordat u een verband aanbrengt. U kunt het schuimverband aanpassen door het op maat te knippen voor een specifieke wond. Het verband moet de droge omringende huid minimaal 1-2 cm bedekken en bij de grotere formaten 3-5 cm. U kan het verband fixeren door gebruik te maken van een [fixatiepleisters](#) (bij voorkeur met silicone) of een [op zichzelf klevende windel](#). Bespreek met uw arts of verpleegkundige hoe vaak er een verbandwissel moet gebeuren.