

Artikelnummer	040202
Prijs excl. BTW	€ 5,24
Prijs incl. BTW	€ 6,34
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Evercare wondpleister op rol is gemaakt van zachte non-woven materiaal met centraal absorberend kompres.

Wondpleister op rol met niet-verklevend wondkussen

Evercare wondpleister op rol is gemaakt van wit en zacht non-woven materiaal met een centraal absorberend kompres. Het absorberende kompres is afgewerkt met niet-verklevend materiaal dat voorkomt dat het aan de wond kleeft. Ontworpen om te worden gebruikt voor de bescherming en genezing van kleine oppervlakkige wonden. Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.

Perfect hechtend en op de juiste maat af te knippen

Deze huidvriendelijke zelfklevende wondpleister kan worden verwijderd van huid en haar zonder resten achter te laten. De wondpleister heeft een lengte van 5m en kan hierdoor eenvoudig op de juiste maat worden afgeknipt naar gelang grootte van de verwonding. Hierdoor hebt u steeds het juiste formaat bij de hand.

Kenmerken

- ademend, wit, niet-geweven elastische wondpleister op rol
- gemaakt van 100% non-woven polyester
- hypoallergeen
- met polyacrylaat lijm
- niet-verkleven kompres

- voor de gevoelige huid
- verwijderbaar van huid en haren zonder lijmresten
- latexvrij

Indicatie

Wordt gebruikt voor de bescherming en genezing van kleine oppervlakkige wonden

Hoe moet u een wondpleister gebruiken?

1. Om een wond goed te behandelen is het belangrijk dat u ten alle tijde zorgt voor schone handen en een schone omgeving.
2. Vervolgens reinigt u het wondje met water en een ontsmettingsmiddel.
3. Knip een stukje pleister van de rol, naar gelang de grootte van de wonde.
4. Trek vervolgens het schutvelletje aan een kant van de pleister af, en zorg ervoor dat u het kompres niet aanraakt.
5. Plaats de pleister voorzichtig over de wond en haal het tweede schutvelletje weg.