



Artikelnummer	0950051
Prijs excl. BTW	€ 21,33
Prijs incl. BTW	€ 25,81
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Histoacryl Octyl wondlijm: DE OPLOSSING VOOR WONDSLUITING

Voordelen Histoacryl Octyl wondlijm:

- Wondsluiting in minder dan één minuut.
- Zeer snelle droging
- Korte behandelingstijd en patiëntvriendelijk
- Gemakkelijk aan te brengen en te doseren
- Effectieve microbiologische barrière.
- Significant minder pijn dan hechtmateriaal
- Besparing van hechtmateriaal en wondverbanden
- Histoacryl Octyl wondlijm is vochtbestendig
- De blauwe kleur wordt doorzichtig na verloop van tijd
- Eén laag is voldoende.
- Laat los na ongeveer 5 a 10 dagen

- Kan bij kamertemperatuur bewaard worden.
- Steriel verpakt

Gebruiksaanwijzing Histoacryl Octyl wondlijm

Stap 1: De incisie- of traumaplaats moet schoon en droog zijn alvorens de wondlijm aan te brengen. Zorg ervoor dat de wondranden gemakkelijk kunnen worden benaderd. Stap 2: Haal de Histoacryl Octyl wondlijm uit de steriele verpakking. Schroef de applicator op de tube met de klok mee totdat de applicator strak vastzit op de buis. De applicator doorboort het foliemembraan en de wondlijm zal kunnen vloeien. Stap 3: Houd de punt van de tube naar beneden. Knijp voorzichtig vanaf de onderkant in de tube totdat de lijm zichtbaar (blauwe kleur) wordt door de applicator. Houd de tube van de patiënt weg, totdat u klaar bent om de huidlijm aan te brengen. Stap 4: Breng aan door zachtjes in de tube te knijpen en de wondlijm heen en weer aan te brengen over de wond. Blijf de wondranden dichthouden totdat de kleefstof kleverig wordt - gewoonlijk minder dan 20 seconden. Een gladde en gelijkmatige laag wondlijm is wenselijk. De blauwe wondlijm wordt na verloop van tijd transparant. Stap 5: Zodra het kleefmiddel volledig is opgedroogd kunt u afdekken met een tweede verband. Als een tweede verband wordt gebruikt, NIET op de kleefplaats aanbrengen totdat het volledig kleefvrij is. Het aanbrengen van een verband terwijl het nog kleverig is, kan leiden tot verwijdering van de wondlijm bij het verwijderen van het secundaire verband en mogelijk tot het opnieuw openen van de wond. Verkiest u toch voor hechtingstrips (Steri-strips, Leukostrips,...), dan kan u deze [hier](#) terugvinden.