

Lomatuell Pro (gelvormend contactnetwerk) - Steriel - 5 x 5cm - 10 stuks

08/10/2025 04:49:33



Artikelnummer	000623
Prijs excl. BTW	€ 11,87
Prijs incl. BTW	€ 14,36
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

Lomatuell Pro (gelvormend contactnetwerk) - Steriel - 5 x 5cm - 10 stuks Lomatuell Pro is een gelvormend contactnetwerk. Het verlaagt het verklefings-risico van de wondbedekking met de wond en de wondrand, en ondersteunt het wondgenezingsproces. Lomatuell Pro bestaat uit een grofmazig gaas van polyestervezel en een coating van een polymeermatrix (een elastisch vervormbare fixatiemassa), vaseline en hydrocolloïd. Als de hydrocolloïddeeltjes in contact komen met wondexsudaat, vormen ze een gel en houden zo het wond milieu vochtig. Daarbij heeft de vaseline een vetherstellende werking voor droge wondgebieden en de wondrand. De open netstructuur van het grofmazige gaas stimuleert ten slotte de afvoer van overvloedig exsudaat naar een secundair verband. Lomatuell Pro is flexibel en soepel, kan op maat worden geknipt en kan aan beide zijden worden gebruikt. Hierdoor is het veilig en eenvoudig te gebruiken. De wondcontactlaag bestaande uit vaseline en hydrocolloïd maakt een nagenoeg pijnloze en atraumatische verbandwisseling mogelijk: in een internationale studie beoordeelde 97,1% van alle patiënten de atraumatische

verwijdering van Lomatuell® Pro als 'goed' tot 'zeer goed' na een gebruik van gemiddeld 2 tot 4 dagen!

Interval tussen verbandwisselingen

Het aanbevolen interval tussen verbandwisselingen bedraagt over het algemeen 2-4 dagen. Afhankelijk van het type wond en het verloop van de wondgenezing kan het verband langer (maximaal 7 dagen) of korter op de wond blijven.

Toepassingsgebieden van Lomatuell Pro

- Wondgenezingsfasen
 - Exsudatiefase
 - Granulatiefase
 - Epithelialisatiefase
- Chronische wonden
 - ulcus cruris
 - diabetische voetulcers
 - decubitus
- Acute wonden
 - scheur-, snij- en schaafwonden
 - tweedegraads verbrandingen
- post chirurgische wonden
 - secundair genezende operatiewonden
 - split-skin-afnameplekken
- met onderdruktherapie als wond afstandsgaas te combineren^{*)}

^{*)} *gebaseerd op in-vitro-onderzoeken*

Eigenschappen van Lomatuell Pro

- opbouw van een laagje gel van vaseline en hydrocolloïddeeltjes
- atraumatische verbandwissel
- eenvoudige toepassing
- aan beide zijden te gebruiken
- kan op maat worden geknipt voor diverse wondafmetingen en lichaamsgebieden
- ondersteuning van de wondgenezing
- het risico van aan de wond kleven, wordt geminimaliseerd
- flexibel, soepel materiaal
- goede afvloeiing van exsudaat in het secundaire verband

- vrijwel pijnloze verbandwisseling

Product samenstelling van Lomatuell Pro

Polyestervezel-netstructuur geïmpregneerd met een coatingsmassa bestaande uit polymeermatrix (een elastische, vervormbare fixatiemassa), vaseline en hydrocolloïd