


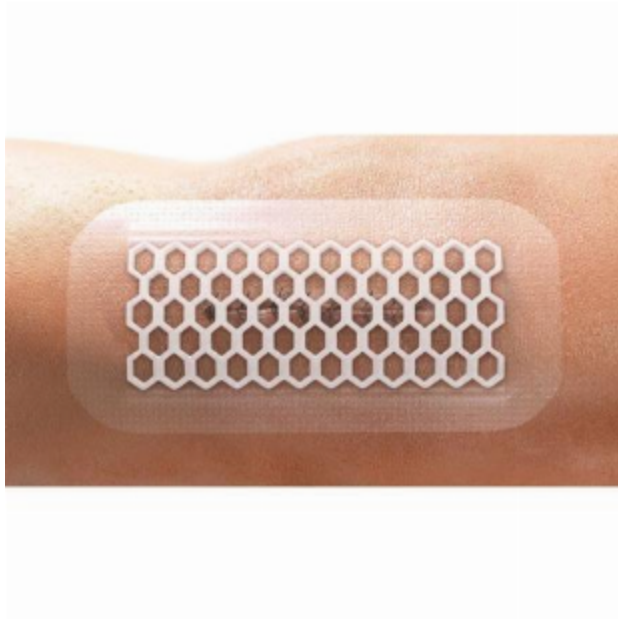

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 041049                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 48,26                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 58,39                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 8 op voorraad |

## Omschrijving

OPSITE Post-Op Visible is een waterdicht transparant en bacteriewerend verband dat continue wondinspectie toelaat. OPSITE Post-Op Visible heeft een permanent zicht op de wond met een superieure absorptie.

## Kenmerken van OPSITE Post-Op Visible

- **Unieke foamstructuur** Maakt een tussentijdse wondevaluatie mogelijk zonder het verband te hoeven optillen of verwijderen. Dit vermindert beschadiging aan het wondbed, minimaliseert het risico op infectie en draagt zo bij aan een kosteneffectieve behandeling.
- **Hoge waterdampdoorlaatbaarheid (MVTR)** De topfilm heeft een bijzonder hoge waterdampdoorlaatbaarheid dankzij de unieke (IV3000) structuur. Dit zorgt ervoor dat overtollig vocht kan verdampen en helpt infectie voorkomen.
- **Bacteriële barrière** Biedt een effectieve barrière tegen bacteriën, inclusief MRSA, om het risico op infectie te verminderen.?

- Waterdichte top-film Patiënten kunnen met OPSITE Post-Op Visible douchen.
- Sterk absorberende foam-pad Laterale verdeling over de gerasterde foam-pad zorgt voor; maximale absorptie zonder het zicht op de wond te verliezen, minder kans op maceratie en een minimal aantal verbandwisselingen voor een kosteneffectieve behandeling.


## Indicaties

Voor de wondverzorging van acute wonden zoals:


- Postoperative wonden
- Snijwonden
- Schaafwonden
- Brandwonden
- met weinig tot matig exsudaat

## Hoe en wanneer te vervangen?

OPSITE Post-Op Visible is gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Eenmaal over de wond geplaatst, zorgen het onopvallende ontwerp van het verband en de hypo-allergene kleeflaag voor comfort van uw patiënt.
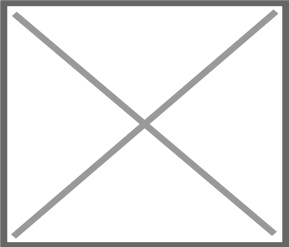
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Stap 1</b></p> <p style="text-align: center;">OPSITE Post-Op Visible - Step 1</p> <p>Haal het verband uit de verpakking. Verwijder de wit/oranje schutbladen gemarkeerd met 1.</p>                                                                            | <p style="text-align: center;"><b>Stap 2OP</b></p> <p>Houd vast aan de niet-kl...<br/>u deze zorgvuld...</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Stap 3</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>OPSITE Post-Op Visible - Step 3</p>  </div> <p>Wrijf het verband op zijn plaats met een lichte druk op de randen.</p> | <p style="text-align: center;">OPSITE Pos</p> <p>Verwijder met behulp...<br/>gemarkeerd met 2. V...<br/>co</p> |


## Verwijderen

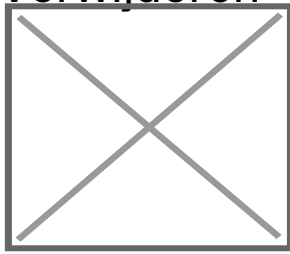


OPSITE Post-Op Visible - Removal

1. Lift een hoek op
2. Trek deze naar u toe - weg van het wondkussen
3. Laat los
4. Herhaal dit langs de rand van het verband

## Wanneer vervangen?

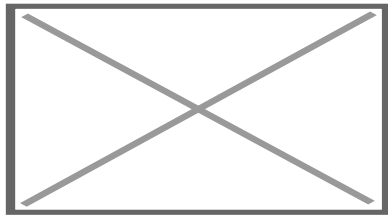

Hoeft nog niet vervangen te worden

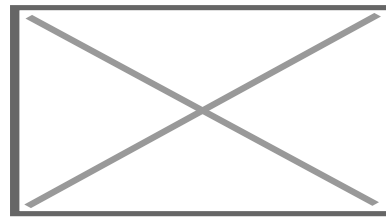

Vervang het verband

## Extra Informatie

| Omschrijving                        | Verpakking |
|-------------------------------------|------------|
| Op-Site Post-Op Visible 10cm x 8 cm | 20 stuks   |
| Op-Site Post-Op Visible 15cm x 10cm | 20 stuks   |
| Op-Site Post-Op Visible 20cm x 10cm | 20 stuks   |
| Op-Site Post-Op Visible 25cm x 10cm | 20 stuks   |