


PolyMem Basic Absorberend membraanverband - Steriel - 10 x 10cm - 15 stuks

08/10/2025 02:10:58

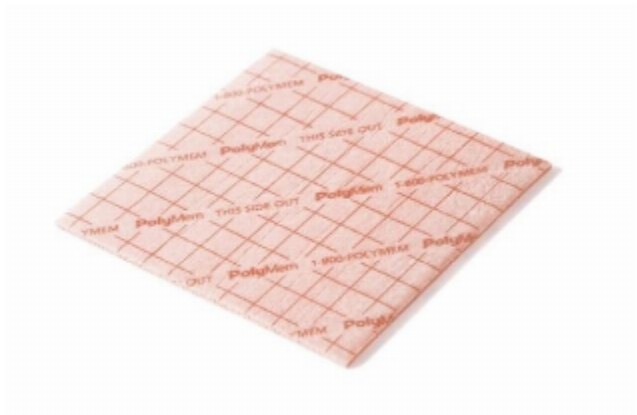

Artikelnummer	020794
Prijs excl. BTW	€ 108,58
Prijs incl. BTW	€ 131,38
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

PolyMem Basic Absorberend membraanverband - Steriel - 10 x 10cm - 15 stuks

PolyMem is een geavanceerd polymerisch membraanverband dat wondreiniging, pijnverlichting en een optimaal vochtig wondmilieu biedt.
Betrouwbare keuze voor wondzorg

PolyMem wordt sinds 1995 veelvuldig ingezet door zorgprofessionals om wonden sneller en effectiever te laten genezen. Het biedt actieve wondreiniging, vermindert pijn, dempt

ontstekingen en creëert een optimaal wondklimaat voor snel herstel. Geschikt voor alle soorten wonden en genezingsfasen (Met uitzondering van 3e graads brandwonden). Dankzij deze veelzijdige werking is het een waardevolle keuze voor iedere zorgprofessional.

Gebruik van PolyMem membraanverband

- Reinig de wond volgens het gebruikelijke protocol.
- Breng PolyMem aan op de wond en zorg voor een overlap van minimaal 1 cm rondom de wondrand.
- Optioneel: Teken de wondrand af op de buitenzijde van het verband, indien gewenst.

Belangrijke aanwijzingen

- Gebruik geen andere producten die het contact tussen PolyMem en het wondbed kunnen verstoren.
- Wondspoelen is niet nodig: De actieve reiniger in PolyMem vervangt dit proces. Het gebruik van andere spoeloplossingen kan de genezing vertragen.

Wat te verwachten bij het gebruik

- In de eerste dagen van de behandeling kan de wond tijdelijk meer exsudaat produceren of zelfs groter worden. Dit is normaal en komt door het "clean out"-effect, het schoonmaakproces dat PolyMem in gang zet.
- Droge wond: Als de wond droger wordt, kunt u PolyMem membraanverband licht bevochtigen met water om de actieve componenten in het verband opnieuw te activeren.

Kenmerken

- Knipbaar - Niet zelfklevend - Maximaal 7 dagen.
- Absorberend (42 ml per 100 cm²/24u).
- Met folie bovenzijde (MVTR 1000 gram/m²/24u).